

MVZ für Histologie, Zytologie und molekulare Diagnostik Trier GmbH

Prof. Dr. med. Dr. phil. J. Kriegsmann
PD Dr. med. habil. Dipl.-Med. M. Otto
Prof. Dr. med. V. Krenn
Prof. Dr. med. B. Klosterhalfen

Max-Planck-Str. 17, 54296 Trier
Tel.: +49(0)651- 1461830
Fax: +49(0)651-14618323
Email: labor@molekularpatho-trier.de
Homepage: www.molekularpatho-trier.de



Informationen zur Entnahme und dem Transport von Blutproben mit STRECK™-Röhrchen für die Liquid Biopsy-Untersuchung

- ✓ Blutentnahme so planen, dass die entnommene Probe noch am gleichen Tag verschickt werden kann (freitags und am Tag vor einem Feiertag keine Blutprobe entnehmen)
- ✓ STRECK™-Röhrchen eindeutig beschriften (Patientendaten, Entnahmedatum)
- ✓ Bei Exposition der im STRECK™-Röhrchen enthaltenen Kalium-EDTA- und Stabilisierungs-Lösung betroffene Körperpartien sofort mit reichlich fließendem Wasser spülen (weitere Sicherheitshinweise siehe Homepage der Firma Streck: <https://www.streck.com/collection/cell-free-dna-bct/>)
- ✓ STRECK™-Röhrchen steht unter Vakuum, daher erfolgt die Blutentnahme erst, wenn die Kanüle den Gummiverschluss der STRECK™-Röhrchen vollständig durchbrochen hat
- ✓ Rückfluss aus dem Röhrchen bei der Entnahme unbedingt vermeiden
- ✓ STRECK™-Röhrchen vollständig füllen (10 ml)
- ✓ Nach der Entnahme STRECK™-Röhrchen unverzüglich 10x invertieren
- ✓ Die Blutprobe darf nicht eingefroren werden
- ✓ STRECK™-Röhrchen in der Versandbox zusammen mit dem ausgefüllten Auftragsschein noch am gleichen Tag verschicken:

MVZ für Histologie, Zytologie und
Molekulare Diagnostik Trier GmbH
Max-Planck-Str. 17
D-54296 Trier
Tel: 0651 / 1461830
Fax: 0651 / 14618323
Email: labor@molekularpatho-trier.de

Für verbleibende Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr MVZ-Team Trier