


MVZ für Histologie, Zytologie und molekulare Diagnostik Trier GmbH

Registernummer HRB 44346 · Amtsgericht Wittlich

<p>Geschäftsführung: Prof. Dr. med. Bernd Klosterhalfen Prof. Dr. med. Veit Krenn · Prof. Dr. med. Dr. phil. Jörg Kriegsmann PD Dr. med. habil. Dipl.-Med. Mike Otto (Ärztlicher Leiter) Dr. rer. nat. Petra Wandernoth</p>	<p>Max-Planck-Str. 17, 54296 Trier Tel.: +49(0)651-9487280 Fax: +49(0)651-94872823 Email: mol@patho-trier.de Homepage: www.patho-trier.de</p>	 <p>PATHOLOGIE TRIER Histologie, Zytologie, Molekulare Diagnostik</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informationen zur Entnahme und dem Transport von Blutproben mit STRECK™-Röhrchen für die Liquid Biopsy-Untersuchung

- ✓ Blutentnahme so planen, dass die entnommene Probe noch am gleichen Tag verschickt werden kann (freitags und am Tag vor einem Feiertag keine Blutprobe entnehmen)
- ✓ STRECK™-Röhrchen eindeutig beschriften (Patientendaten, Entnahmedatum)
- ✓ Bei Exposition der im STRECK™-Röhrchen enthaltenen Kalium-EDTA- und Stabilisierungs-Lösung betroffene Körperpartien sofort mit reichlich fließendem Wasser spülen (weitere Sicherheitshinweise siehe Homepage der Firma Streck: <https://www.streck.com/collection/cell-free-dna-bct/>)
- ✓ STRECK™-Röhrchen steht unter Vakuum, daher erfolgt die Blutentnahme erst, wenn die Kanüle den Gummverschluss der STRECK™-Röhrchen vollständig durchbrochen hat
- ✓ Rückfluss aus dem Röhrchen bei der Entnahme unbedingt vermeiden
- ✓ STRECK™-Röhrchen vollständig füllen (10 ml)
- ✓ Nach der Entnahme STRECK™-Röhrchen unverzüglich 10x invertieren
- ✓ Die Blutprobe darf nicht eingefroren werden
- ✓ STRECK™-Röhrchen in der Versandbox zusammen mit dem ausgefüllten Auftragschein noch am gleichen Tag verschicken:

MVZ für Histologie, Zytologie und
Molekulare Diagnostik Trier GmbH
Max-Planck-Str. 17
D-54296 Trier
Tel: 0651 / 948714000
Fax: 0651 / 948714098
Email: mol@patho-trier.de

Für verbleibende Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr MVZ-Team Trier