

Sanfte hochsensitive Mundkrebsfrüherkennung (Leukoplakiediagnostik) mit Laminin 5 Immuncytochemie

Beschriftung von **drei** Objektträgern mit:

- Patientennamen und
- Entnahmelokalisation

Patienten schlucken lassen.



Bürste auf der Läsion mit leichtem Druck um die eigene Achse drehen.

Bürste an verschiedenen Stellen des Objektträgers um 360° rotieren.
Bitte nicht ausstreichen.


Bürstenabstrich in gleicher Weise auf **den anderen** Objektträgern wiederholen.

Alle Objektträger 10 Minuten an der Luft trocknen lassen.


Alle Objektträger versenden mit:
- Einsendeschein

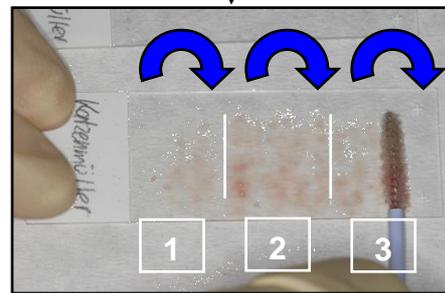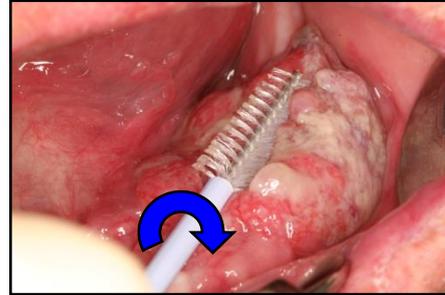

Laminin 5

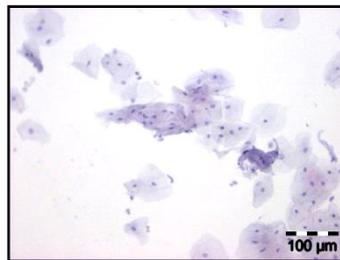

Gesunde Mucosa

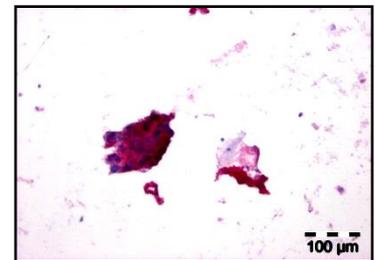

Plattenepithelcarcinom

Kostenlose Bestellung per Fax:
0651-948711234

Anzahl benötigter Abstrichsets: _____

Praxisstempel und Unterschrift